

取扱注意事項

製品名 加速度脈波計・心拍間変異分析 ボディチェッカー

1. 使用してよい場所

特に規定はない。

2. 機器を操作できる者

本人が操作することが原則である。補助する者に制約はない。

3. 診断者

表示された結果のとおり。

4. 説明・解説

「〇〇歳です」という表示されるので、被験者の歴年齢と比較していただければよい。

5. 正しく使用するための注意事項

【使用前の注意】

- (1) 電源コードが破損した場合は、すぐに電源コードをコンセントから抜いてください。感電、ショート、火災の原因になります。
- (2) 電源コードはAC 100Vのコンセントに単独で接続してください。他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。
- (3) 電源コードのプラグは根元まで確実に差し込んでください。不完全な場合、感電、発熱による火災の原因になります。
- (4) 電源コードのプラグのほこりなどは、定期的に取りってください。プラグにほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります。
- (5) 濡れた手で電源コードの抜き差しをしないでください。感電の原因になります。

【使用中の注意】

- (1) 結果画面の印刷中に、測定を開始しないでください。

【使用後の注意】

- (1) 定められた薬品を用いて機器を洗浄又は消毒してください。
- (2) 必ず定期点検を行ってください。

6. 故障の際の連絡先

福井県国民健康保険団体連合会 業務課 保険者支援グループ TEL 0776-57-1612

東京医研株式会社 〒206-0802 東京都稲城市東長沼 1131-1 TEL 042-378-6630(代)