

取扱注意事項

製品名 足指力計測器(チェッカーくん)

1. 使用してよい場所

法的規定はない。

2. 機器を操作できる者

法的規定はない。

3. 診断者

法的規定はない。

4. 説明・解説

表示された計測値をもとに、「頑張ろう」「いい感じ」「上出来」の3つのグループのどのグループに入るかを説明する。

5. 安全上の注意事項

- (1) 白癬菌などの感染防止のために動作部のカバーと足置き部の専用紙は、計測者が代わるごとに取り替えてください。
- (2) 本体の隙間や穴に指を入れしないでください。けがをする恐れがあります。
- (3) 表示部には乗らないでください。破損してけがをする恐れがあります。
- (4) 絶対に分解・改造をしないでください。
- (5) ほこりの多いところに長時間放置しないこと。
- (6) 湿気の多いところやストーブ等火気のそばに置かないでください。
- (7) 本体に水や洗剤をかけないでください。装着部位に水などの液体が入ると故障の原因になります。 (7)

6. 使い終わった後始末

- (1) リセットボタンを押して、針をゼロの位置に戻してください。
- (2) 鉄板部分は常に清潔に保ち、マットの部分の汚れは柔らかい布などで取り除いてください。
- (3) 説明書、調整ノブの所在を確認し、箱に入れて保管してください。

7. 故障の際の連絡先

福井県国民健康保険団体連合会

業務課 保険者支援グループ

TEL 0776-57-1612
