

取扱注意事項

製品名 足裏バランス測定装置(フットルック)

1. 使用してよい場所

法的制限はない。

2. 機器を操作できる者

法的制限はない。

3. 診断者

法的制限はない。

測定機器ではあるが、医療機器ではないので診断に準じる行為を行うことはできない。(外反母趾の診断など)

4. 説明・解説

表示された画像をもとに「左右の足のバランス」「足の前後バランス」「浮き指か否か」を説明

5. 正しく使用するための注意事項

- ① 設置の際は、スキャナーに誰も乗っていない状態で一度プレビューを行い、プレビュー画面が真っ黒に表示されればOK。
蛍光灯の直下などで使用すると光が写り込み画面上が白くなるので、光が入り込まない場所に設置して下さい。
(光が写り込むと正確な測定ができない。)
- ② 安定のよい、水平な場所に設置してください。
- ③ 裸足でスキャナーに乗るため、白癬菌などの感染防止のため被験者が変わるたびに台をアルコールなどで消毒して下さい。
- ④ 移動の際はできるだけ振動や衝撃を与えないようにして下さい。

6. 故障の際の連絡先

福井県国民健康保険団体連合会 業務課 保険者支援グループ Tel 0776-57-1612

株式会社フットルック 福岡県福岡市博多区中洲中島町 4-12-2F Tel 092-292-5314