

取扱注意事項

製品名 加速度脈波測定器(メタボリ先生)

1. 使用してよい場所

特に規定はない。

2. 機器を操作できる者

本人が操作することが原則である。補助する者に制約はない。

3. 診断者

表示された結果のとおり。

4. 説明・解説

「〇〇歳です」という表示されるので、被験者の歴年齢と比較していただければよい。

5. 正しく使用するための注意事項

【使用前の注意】

- (1)水、直射日光、強い白熱照明、が当たらない場所および気圧、湿気、温度、誇り、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより、悪影響の生ずる恐れのない場所に設置してください。
- (2)傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などに注意して設置してください。
- (3)化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に放置しないでください。
- (4)万一、指の腹にあたる部分の脈波探知部シート（透明）がはがれかけている、破損が見られる場合などは、本装置に手を加えず直ちに連合会に連絡してください。場合によっては、販売店に連絡してください。
- (5)濡れた手で操作や測定をしないでください。感電や故障の原因となります。
- (6)内部に水や異物を入れないでください。火災や感電の原因となります。
- (7)雷がなっている時は、測定しないでください。感電の恐れがあります。
- (8)指に力を入れると、正常な波形が得られない場合があります。

【使用中の注意】

- (1)装置全般の異常を感じたら、直ちに使用を中止し、電源を切断し、販売店に連絡してください。
- (2)被験者の体に異常を感じた場合、被験者に安全な状態で機器の動作を止める等の処置をし、医療機関等に連絡して下さい。
- (3)被験者および装置全体に異常がないか常に監視してください。
- (4)雷が鳴り出したら測定を中止してください。感電の恐れがあります。

6. 故障の際の連絡先

福井県国民健康保険団体連合会 業務課 保険者支援グループ TEL 0776-57-1612

株式会社東京法規出版 ライフサイエンス事業部 本社 〒113-0021 東京都文京区本駒込 2-29-22
TEL 03-5977-0350(直通) FAX03-5977-0340